

# ReSound Unite™ Fernbedienung



## Produktbeschreibung

Die ReSound Unite™ Fernbedienung ist für Kunden, die einen schnellen Überblick über die Einstellung ihrer Hörsysteme und des Zubehörs schätzen. Sie können die Hörprogramme wechseln, die Lautstärke verändern und die Übertragung des ReSound Unite™ Audio Beamers steuern. Die Fernbedienung ermöglicht die individuelle Einstellung für jedes Hörsystem separat.

Ihre Kunden haben alles im Blick. Die ReSound Unite™ Fernbedienung hat mehr als nur Tasten. Sie verfügt über ein leicht ablesbares Farb-Display, das Ihre Kunden jeder Zeit über die Einstellung Ihrer Hörsysteme informiert. Mit einem Blick zeigt es, welches Hörprogramm und welche Lautstärke eingestellt ist. Und das für jede Seite separat.

Ein übersichtliches Tastenfeld ermöglicht die Einstellung der Programme und der Lautstärke. Die Fernbedienung ist klein, elegant und liegt gut in der Hand. Die zuschaltbare Tastensperre verhindert, dass z. B. beim Tragen in der Hosen- oder Handtasche die Einstellungen verändert werden.

## Einfache Paarung

- Drücken Sie einfach die Paarungstaste an der Fernbedienung. Öffnen und schliessen Sie das Batteriefach des Hörsystems. Innerhalb von 20 Sekunden sind Hörsystem und Fernbedienung sicher miteinander gepaart.
- Die Paarung kann ebenso mit der ReSound Aventa® 3 Anpass Software vorgenommen werden.

## Einfache Bedienung

- Mit einem Druck auf die Tasten werden Hörprogramme und Lautstärke der Hörsysteme verändert.
- Die Lautstärke lässt sich für jedes Ohr einzeln und individuell verändern.
- Mit der 'Home' Taste setzen Sie die Hörsysteme wieder in die Grundeinstellung.
- Die TV Taste aktiviert die Übertragung des ReSound Unite Audio Beamers.
- 2.4 GHz Funktechnologie
- Mit diesem sicheren Funkstandard haben Sie eine starke, klare und stabile Übertragung.

### Deutschland

GN Hearing GmbH  
Geschäftsbereich ReSound  
An der Kleimannbrücke 75  
48157 Münster  
Tel.: 0251 -20396-0  
Fax: 0251 -20396-250  
info@gnresound.de  
www.gnresound.de

### Schweiz

GN ReSound AG  
Schützenstrasse 1  
8800 Thalwil  
Tel.: 044 722 91 11  
Fax: 044 722 91 12  
info@gnresound.ch  
www.resound.ch

### Österreich


GN ReSound  
Hörtechnologie GmbH  
Wimberggasse 14-16  
1070 Wien  
Tel.: 01 524 54 00-0  
Fax: 01 524 54 00-444  
info@gnresound.at  
www.gnresound.at

# ReSound

rediscover hearing

## Beschreibung

1. Farb-Display
2. Tastensperre
3. Taste für ReSound Unite Audio Beamer
4. Grundeinstellung
5. Lautstärke erhöhen
6. Lautstärke verringern
7. Aktiviert nur linkes Hörsystem
8. Aktiviert nur rechtes Hörsystem
9. Programmwechsel
10. Paarungstaste
11. Batterien Typ AAAA

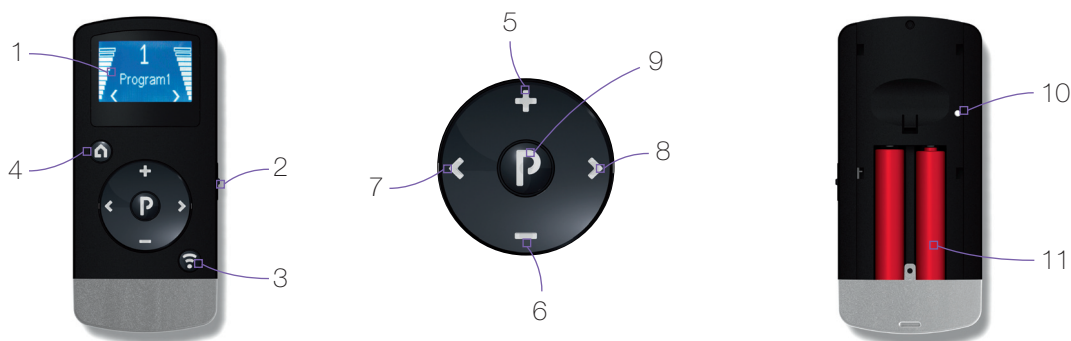

## Technische Daten

Abmessungen	90 x 40 x 15 mm
Gewicht	46 g
Display	128 x 128 Pixel Farb-Display
Batterien	2 x 1,5 V AAAA Batterien
Funkverbindung	2 Hörsysteme pro Fernbedienung
Funkfrequenz	2,4 GHz
Funkreichweite	bis zu 3 Meter
Übertragungsgeschwindigkeit	2 Mbit
Abstrahlung	Max. -4 dbm Unter Einhaltung aller gültigen Standards
ESD Toleranz	6KV HBM
Betriebstemperatur	0 bis 55 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 bis +60 Grad Celsius