






# Inhaltsverzeichnis

Gebrauch des ConnectLine Phone Adapters 2.0	4
Unterschiede im Einsatz mit Streamer Pro und Streamer 1.4	5
Eingehende Anrufe	6
Ausgehende Anrufe	10
Weitere Informationen	13

## Gebrauch des ConnectLine Phone Adapters 2.0


Der ConnectLine Phone Adapter 2.0 stellt eine drahtlose Verbindung zwischen dem Streamer und einem analogen Festnetztelefon her. Er unterstützt eingehende und ausgehende Telefonate. Während eines Anrufs arbeiten Ihre Hörsysteme wie ein Headset. Da das Mikrofon am Streamer um den Hals getragen wird, haben Sie beim Telefonieren die Hände frei.

Stellen Sie zunächst sicher, dass der ConnectLine Phone Adapter 2.0 korrekt installiert wurde. Informationen zum Anschluss finden Sie in der Installationsanleitung für den Phone Adapter. Diese Bedienungsanleitung erläutert wie Sie den Streamer zum Telefonieren einsetzen.


Um den ConnectLine Phone Adapter zu nutzen, muss der Streamer einmalig mit dem Phone Adapter gekoppelt werden. Die Verbindung erfolgt danach automatisch, wenn sich Streamer und Phone Adapter in Reichweite befinden (Seite 13). Der Phone Adapter ist mit dem Streamer verbunden, wenn die Power-Anzeige  am Phone Adapter konstant blau leuchtet.

## Unterschiede im Einsatz mit Streamer Pro und Streamer 1.4

Die Darstellung zeigt die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Streamer und dem neuen Streamer Pro.

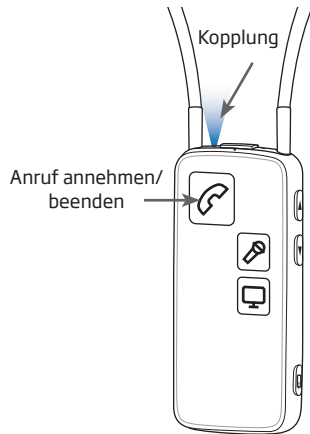

Streamer Pro

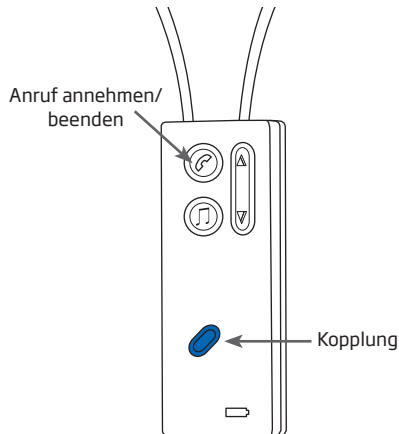

Streamer 1.4

# Eingehende Anrufe



## Einen Anruf annehmen und beenden

Stellen Sie sicher, dass Sie in das Mikrofon auf der Oberseite des Streamers sprechen können.







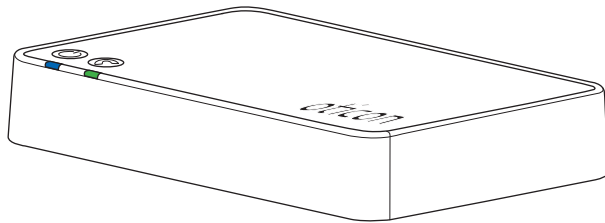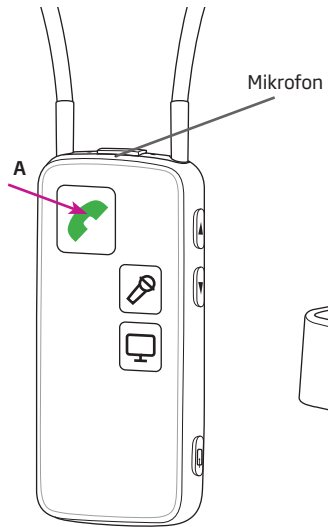

Wenn Sie einen Anruf auf dem Festnetztelefon erhalten, hören Sie einen Klingelton in Ihren Hörsystemen. Die Status-Anzeige auf dem Phone Adapter blinkt grün. Gleichzeitig blinken die Telefontaste und die Status-Anzeige auf dem Streamer ebenfalls grün.

**Drücken Sie kurz die Telefontaste auf dem Streamer (A)**, um den Anruf anzunehmen. Sie hören einen kurzen Bestätigungston in Ihren Hörsystemen. Die Telefontaste und die Status-Anzeige des Streamers sowie die Status-Anzeige auf dem Phone Adapter leuchten jetzt konstant grün. Sprechen Sie ganz normal, so als ob Ihr Gesprächspartner vor Ihnen sitzen würde.

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie einfach kurz die Telefontaste auf dem Streamer. Die grün leuchtende Telefontaste auf dem Streamer geht aus.



## Einen Anruf annehmen

Streamer Pro Status-Anzeige	Streamer Pro Telefontaste	Anzeigen am Phone Adapter 2.0	Bedeutung
			Streamer und Phone Adapter sind verbunden.
			Ein Anruf geht ein: Die Status-Anzeige auf dem Phone Adapter und die Status-Anzeige auf dem Streamer Pro blinken grün. Sie hören einen Klingelton in Ihren Hörsystemen.
			Wurde der Anruf angenommen, hören Sie einen kurzen Bestätigungston in Ihren Hörsystemen. Sie können jetzt mit dem Gesprächspartner telefonieren.

 Konstant
  Blinkend





# Ausgehende Anrufe

## Einen Anruf ausführen


Stellen Sie sicher, dass Sie in das Mikrofon des Streamers sprechen können.






1. Um einen Anruf zu tätigen, **drücken Sie kurz die Telefontaste am Streamer (A)**. Sie hören nun einen Wählton in den Hörsystemen. Die Telefontaste auf dem Streamer und die Status-Anzeige auf dem Phone Adapter leuchten konstant grün.
2. **Wählen Sie wie gewohnt die Nummer am Telefon (B)**: Bei einem schnurlosen Telefon drücken Sie die Anruftaste und wählen die Nummer (oder umgekehrt, je nach Telefon). Bei einem kabelgebundenen Telefon nehmen Sie den Hörer ab und wählen.
3. Kurz darauf hören Sie das Anrufsignal in Ihren Hörsystemen, das anzeigt, dass der Anruf durchgestellt wird.

Sie können bereits jetzt **den Hörer des Telefons auflegen** (bzw. beim schnurlosen Telefon die Auflegentaste drücken).\*

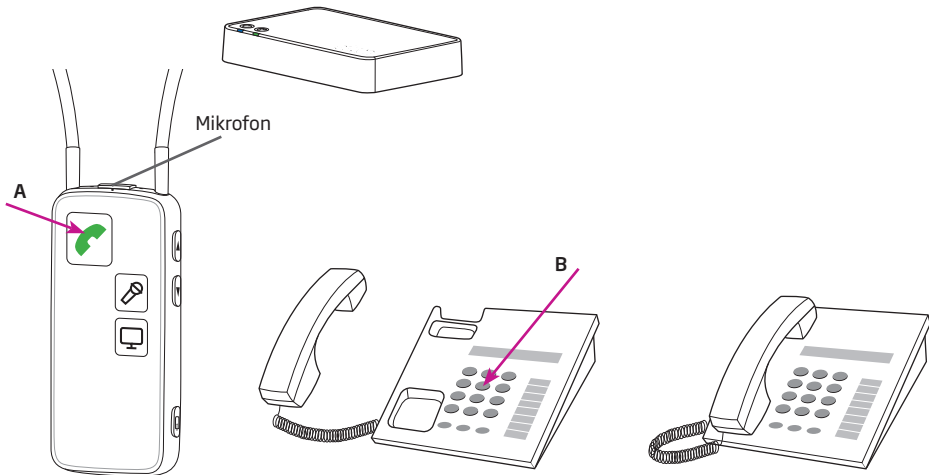Um den Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die Telefon-Taste am Streamer.

\* Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Hörer spätestens am Ende des Anrufs wieder korrekt aufgelegt wird, damit die Telefonleitung für eingehende Anrufe frei ist.



Anruf ausführen			
Streamer Pro Status-Anzeige	Streamer Pro Telefontaste	Anzeigen am Phone Adapter 2.0	Bedeutung
			Streamer und Phone Adapter sind verbunden.
			Drücken Sie kurz die Telefontaste am Streamer. Sie hören nun einen Wählton in den Hörsystemen.

 Konstant 
  Blinken

## Weitere Informationen

### Phone Adapter ausschalten

Wenn Sie keine Telefonanrufe über den Streamer empfangen möchten, schalten Sie den Phone Adapter aus indem Sie den Netzstecker ziehen. Bei normalem Gebrauch benötigt der Phone Adapter sehr wenig Strom, so dass Sie ihn nicht ausschalten müssen.

### Reichweite des Phone Adapters

Der Phone Adapter 2.0 hat eine Reichweite von ca. 30 Metern (zum Streamer Pro). Die exakte Reichweite hängt von vorhandenen Möbeln und Wänden ab. Innerhalb dieser Reichweite können Sie bei guter Klangqualität telefonieren.

Normalerweise hören Sie den Klingelton in Ihren Hörsystemen bis zu einer Distanz von 30-40 Metern (z.B. wenn Sie draußen im Garten arbeiten). Um die Stimme Ihres Gesprächspartners dann klar und deutlich zu verstehen, gehen Sie bitte näher an den Phone Adapter heran.

## **Lautstärke**

Nutzen Sie die Lautstärketasten am Streamer, um die Lautstärke des Telefonsignals in den Hörsystemen zu steuern. Sie regeln die Lautstärke, indem Sie einmal kurz oben (lauter) oder unten (leiser) auf die Taste drücken. Wiederholen Sie das kurze Drücken für weitere Lautstärkeänderungen.

Der Streamer merkt sich die Lautstärke, die Sie zum Telefonieren eingestellt haben. Wenn Sie nach einer Unterbrechung wieder telefonieren, wird automatisch die letzte am Streamer eingestellte Lautstärke für das Telefonat gewählt.

## **Nur das Telefonsignal übertragen**

Wenn Sie das erste Mal mit dem Streamer telefonieren, sind die Hörsystemmikrofone angeschaltet.

Sie können diese stumm schalten, um Nebengeräusche zu reduzieren. Dafür drücken Sie am Streamer Pro die Lautstärketaste oben und unten gleichzeitig für 1 Sekunde. Am Streamer drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten für 2 Sekunden.

Um die Hörsystemmikrofone wieder zu aktivieren, drücken Sie beim Streamer Pro kurz die Lautstärketaste oben oder unten. Am Streamer drücken Sie die Lautstärketaste oben

oder unten erneut für 2 Sekunden. Detaillierte Informationen zum Streamer entnehmen Sie bitte der Streamer Bedienungsanleitung.

Weitere Hinweise und Informationen finden Sie unter [www.oticon.de](http://www.oticon.de).