


# Visit Telefonsender

## BE1431

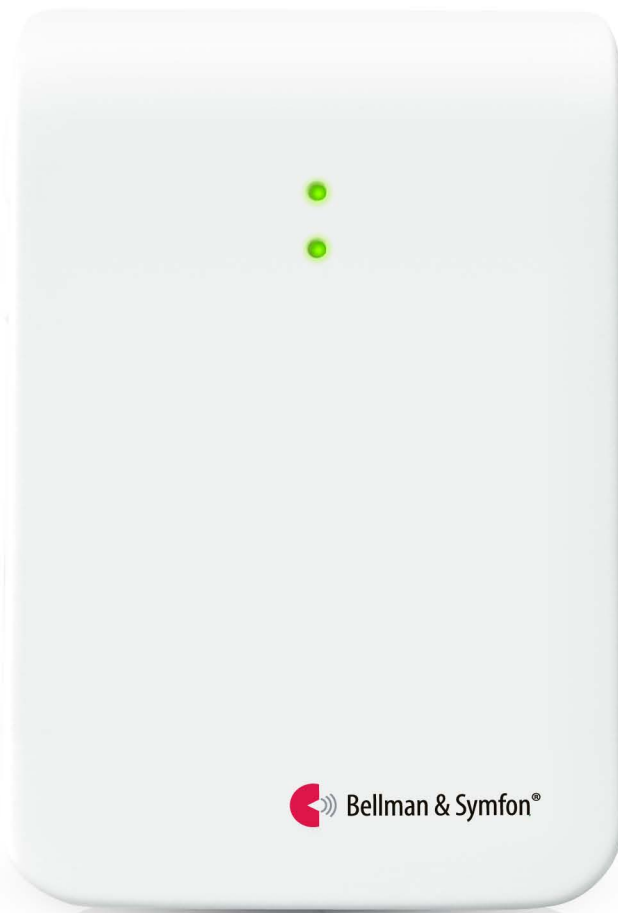

## Bleiben Sie in Kontakt mit Ihren Lieben

Der Visit Telefonsender ist Teil des Visit Alarmierungssystems, welches Menschen mit Hörverlust hilft, Signale in ihrem Zuhause zu bemerken. Er kann verwendet werden, um sowohl Ihre Festnetz- als auch Ihr Mobiltelefon- oder auch eine eingehende Nachricht auf dem Tablet zu erkennen (Zubehör erforderlich).

### Wie es funktioniert

Wenn der Visit Telefonsender aktiviert wird, signalisiert er dies Ihren Visit Empfängern - diese benachrichtigen Sie mit Tönen, Lichtblitzen

oder Vibrationen (je nach Empfänger).

Neben der Telefon-Erkennung, können weitere Signal-Optionen genutzt werden:

- Eine Kontaktmatte (Zubehör)
- Einen Magnetschalter (Zubehör)

Der Visit Telefonsender bietet Ihnen individuelle Signalisierung für die verschiedenen Alarme und eine robuste Funkverbindung die das gesamte Haus abdeckt. Er ist sehr einfach zu installieren, wartungsfrei und arbeitet Jahre mit normalen Standard-Batterien.



### Eigenschaften

**Funktioniert mit den meisten Telefentypen**  
Sowohl Festnetz- und Mobiltelefone \*

**Mehrere Verbindungen**  
Drei separate Trigger-Eingänge

**Anpassbare Benachrichtigung**  
Wählen Sie eine für jeden Trigger

**Lang anhaltende Leistung**  
5 Jahre Batterielaufzeit

**Stabile Funkverbindung**  
Deckt das gesamte Haus ab

\* Mobile Phone Sensor (Zubehör) benötigt



# Technische Daten




## Abmessungen und Gewicht

- Höhe: **4.0", 100 mm**  
 Breite: **2.6", 65 mm**  
 Tiefe: **1.1", 27 mm**  
 Gewicht: **4.2 Unzen, 120 g inkl. Batterien**



## Tasten und Anschlüsse

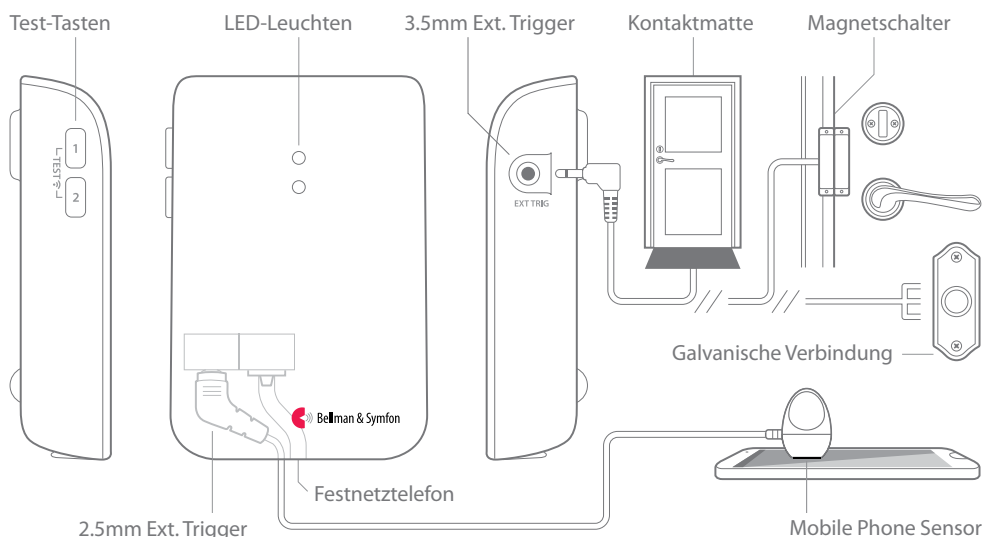

## Ein-/ Ausgänge

- RJ11 Eingang für analoges Telefonnetz
- 2.5 mm ext. Trig Eingang für Mobile Phone Sensor
- 3.5 mm ext. Trig Eingang für anderes Zubehör

## Aktivierung

- Die Test Tasten und das Festnetztelefon
- Ein Smartphone /Tablett via Mobile Phone Sensor
- Die Kontaktmatte oder Magnetschalter
- Die Türklingel etc. verbunden mit dem ext. Trigger

## Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 315 MHz, 433.92 MHz oder 868.3 MHz, je nach Region
- Reichweite: 50 - 200 m, je nach der Funkfrequenz und Gebäudemerkmalen

## Einsatzbereich

- Nur für den Innenbereich
- Temperatur: 59 ° bis 95 ° F (15 ° - 35 ° C)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% (nicht kondensierend)

## Stromversorgung und Batterie

- Stromversorgung  
Batteriebetrieb 2 x 1.5 V AA Lithium oder Alkali
- Stromverbrauch  
Aktiv <70 mA, Leerlauf <15 µA
- Betriebszeit  
Alkali ~ 5 Jahre, Lithium ~ 10 Jahre

## Anzahl der Funkschlüssel

- 64 als Standard. Bis zu 256 mit optionaler Software.

## Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Reinigen mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel.
- Nicht für die Wiederverwendung durch andere Personen vorgesehen.

## Regulatorische Anforderungen

- Entspricht den folgenden Anforderungen: WEEE, Der Grüne Punkt, CE, RoHS, C-tick, A-Tick



## Lieferumfang

- BE1431 Telefonsender
- 2 x 1.5 V AA Alkali-Batterien
- Klettverschluss für die Wandmontage
- Reinigungstuch
- Schraube und Dübel
- Bedienungsanleitung



## Zubehör

Folgendes Zubehör ist verfügbar:

- BE9251 Mobile Phone Sensor
- BE9023 Magnetschalter
- BE9024 Kontaktmatte
- BE9253 Ext. Trigger Kabel (3.5 mm)

## © und TM-2014 Bellman & Symfon AB

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Marken von Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produkt-Designs sind patentiert. Diese Broschüre kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.