

Frequently Asked Questions

Noahlink))) Wireless

Q: *Was ist Noahlink™Wireless?*

A: Noahlink Wireless ist ein neues Industriestandard-Programmierinterface basierend auf der Norm für Bluetooth Low Energy (BLE), auch als Bluetooth Smart bekannt. Dies bedeutet, dass Noahlink Wireless eine vollständig drahtlose Programmierung zwischen Ihrem Computer und den BLE-fähigen Hörsystemen ermöglicht.



Q: *Ist Noahlink Wireless schwierig zu installieren und anzuwenden?*

A: Verbinden Sie es einfach mit Ihrem Computer, und es steht bereit für die Programmierung von BLE-fähigen Hörsystemen verschiedener Hörsystemhersteller.

Sie können Noahlink Wireless mit jedem Computer anwenden, der die minimalen Anforderungen für Noah System erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter www.himsa.com.

Q: *Welche Hörsysteme können mit Noahlink Wireless programmiert werden?*

A: Mit Noahlink Wireless können Sie BLE-fähige Hörsysteme verschiedener Hörsystemhersteller programmieren, und die Anzahl wächst weiter. Eine komplette Liste der lizenzierten Hersteller finden Sie durch Klicken auf Noahlink Wireless unter www.himsa.com.

Jeder Hörsystemhersteller bestimmt, welches seiner programmierbaren Hörsysteme mit Noahlink Wireless kompatibel ist. HIMSZA zertifiziert Noah-Module für die Zusammenarbeit mit Noahlink Wireless, und eine Liste dieser Module finden Sie auf unserer Website (www.himsa.com).

Q: *Ersetzt Noahlink Wireless mein aktuelles NOAHlink- oder HI-PRO-Interface?*

A: Noahlink Wireless kann nur Hörsysteme programmieren, welche über die integrierte BLE-Kommunikation verfügen. Für die anderen Hörsysteme benötigen Sie noch Ihr aktuelles Programmierinterface.

Q: *Kann ich Noahlink Wireless und NOAHlink auf demselben Computer nutzen?*

A: Da Noahlink Wireless und NOAHlink unterschiedliche Verbindungsarten nutzen, sollte es keine Probleme bei der Anwendung beider Interfaces auf demselben Computer geben. Ihr Noah-Modul erkennt, welches Interface für welches Hörsystem zum Einsatz kommt.



Q: *Ich habe gehört, dass Bluetooth eine Radio-Technologie ist. Kann NOAHlink die zusätzlichen Hilfsmittel meiner Kunden stören?*

A: he Die zurzeit erhältlichen FM-Zubehörsysteme arbeiten entweder im 72.1 - 75.9 MHz oder 216-217 MHz Band. Da Bluetooth Low Energy im 2400 - 2483.5 MHz Band arbeitet, erwartet HIMSA keine Probleme durch Störungen mit persönlichen oder Wide-Area-Zubehörsystemen.

Q: *Können BLE Signale von Noahlink Wireless andere Signale stören oder eine Gefahr darstellen?*

A: Die Bluetooth Low Energy Kommunikation wurde für eine optimale Flexibilität ohne Störungen entwickelt. Die empfohlene Entfernung zwischen Ihrem Noahlink Wireless und einem Hörsystem beträgt 3 m, aber in einer Umgebung ohne Störungen mit geradliniger Verbindung können Sie noch eine zufriedenstellende Leistungsfähigkeit in einer Entfernung von bis zu 10 Metern erreichen.

Wie bei anderen BLE-Geräten gibt es keinen Beweis dafür, dass das Bluetooth-Signal, mit dem Noahlink Wireless arbeitet, auf irgendeine Art für Sie, Ihre Kunden oder ungeborene Kinder schädlich sein könnte.

Q: *Wie bestelle ich Noahlink Wireless?*

A: Wie bei Noah und NOAHlink müssen Sie Noahlink Wireless über die HIMSA Mitgliedsfirmen und ihre Vertriebspartner bestellen. Wenden Sie sich bezüglich der Bestellung und des Preises an Ihren Lieferanten.

Eine Liste der HIMSA-Lieferanten finden Sie unter www.himsa.com.

Q: *Was tue ich, wenn ich Service oder Support für ein Noahlink Wireless Gerät benötige?*

A: Wenn Sie innerhalb der Garantiezeit Service oder Support benötigen, ist der Lieferant Ihres Noahlink Wireless dafür zuständig. Vereinbarungen für eine Reparatur nach Ablauf der Garantie können Sie auch mit Ihrem Lieferanten treffen.

